



CASERAPPORT

FORMA INJEKTION TEKNIK

- Lukning af diastema i fronten

INTRODUKTION

Ved brug af FIT-løsningen bliver det æstetiske resultat mere forudsigeligt og den samlede procedure mindre stressende, da en del af behandlingen, nemlig det diagnostiske trin, kan udføres uden for munden og uden patientens tilstedeværelse. Den største fordel ved denne teknik er, at restaureringer først kan designes i Elysee View/ SmileDesign-program og derefter kopieres og overføres i detaljer til de naturlige tænder. Ved komplekse morfologier, udfordrende æstetiske tilfælde eller tilfælde, der kræver genetablering af den okklussale vertikale dimension, kan et forudsigeligt resultat opnås og stiletiden reduceres med denne relativt simple procedure. Hvis nødvendigt, kan justeringer også foretages bagefter.

CASE-BESKRIVELSE

- 20-årig mand henvender sig med et ønske om diastemalukning i overkæben fra 3+3 af æstetiske årsager.
- Patienten har i længere tid ønsket lukning af de små mellemrum i fronten. Tidligere har den kommunale tandpleje afvist at tilbyde ortodontisk behandling, da ønsket var rent æstetisk.
- Der blev afholdt en forventningssamtale, og herefter taget kliniske fotos og intraoralt scan.
- Jeg udarbejdede et individuelt smiledesign, som blev anvendt af Elysee Dental som reference for deres SmileDesign i Exocad.
- Der blev ikke foretaget præparation før FIT-behandlingen.
- Ingen symptomer fra tænder, kæbeled eller tyggemuskulatur.



FØR



EFTER

BEHANDLINGEN



SE OPTAGELSE AF BEHANDLINGEN

Få indblik i behandlingsprocessen

Behandlingsforløbet kan ses i en kort video, som viser hele processen fra start til slut. Videoen varer kun tre minutter og giver et konkret indblik i arbejdsgangen med FIT-teknikken.

Scan QR-koden, og se videoen!



FEEDBACK FRA TANDLÆGE OG PATIENT

Tandlæge Mathias Hauberg

FIT-teknikken er en rigtig god metode til at skabe ro i planlægningen af en case, og jeg opnår et forudsigeligt resultat hver gang, jeg benytter FIT. Det giver en effektiv arbejdsgang og mindre støj, fordi casen er planlagt på forhånd. Elysee Dental er meget lydhøre og gode til at imødekomme mine ønsker i forhold til mit eget smiledesign.

Det er også vigtigt, at jeg primært kan koncentrere mig om min bonding og ikke samtidig skal tænke på æstetik og bid under behandlingen.

Jeg er meget tilfreds med injection moulding-teknikken – og især med den pakkelsesning, jeg bestiller fra Elysee Dental.

Patient: 20-årig mand

Jeg har altid gerne villet have lukket mine små mellemrum i fronten, men skoletandplejen ville ikke rette mine tænder. Derfor er jeg glad for at kunne få det gjort med FIT-behandlingen, og jeg synes, det er blevet, som jeg altid har ønsket mig.